



SEKARGUNA MEDIKA



**BROCHURE
COVALON**

Covawound Silicone 1001010

Self Adherent Soft Silicone Foam Dressing

Product Name : Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound Silicone 1001010
Kemenkes RI AKL : 21603020857

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing.

Indikasi

Venous ulcers, exudate sedang-berat, luka diabetes, foot ulcers, luka bakar superfisial & parsial, luka trauma, luka post operatif.

Eksudat Level

Moderate - Heavy

Kontra Indikasi

- Alergi terhadap kandungan product

Cara Penggunaan

1. Bersihkan luka sesuai prosedur umum.
2. Keringkan dengan lembut area luka.
3. Pilih ukuran CovaWound Silicone yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi.
4. Buka dan Keluarkan CovaWound Silicone dari kemasannya.
5. Lepas kertas penutup CovaWound Silicone dan letakan sisi bagian putih yang tidak ber perekat pada luka
6. Rekatkan bagian CovaWound Silicone yang mengandung perekat pada kulit (With Border*), Fiksasi CovaWound Silicone menggunakan perban elastis atau menggunakan film dressing (Non Border*).

Spesifikasi

- Kode product 1001010
- Ukuran product 10x10 cm
- Isi 10 pcs/box



Covawound Silicone 1001515

Self Adherent Soft Silicone Foam Dressing

Product Name : Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound Silicone 1001515
Kemenkes RI AKL : 21603020857

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing.

Indikasi

Venous ulcers, exudate sedang-berat, luka diabetes, foot ulcers, luka bakar superfisial & parsial, luka trauma, luka post operatif.

Eksudat Level

Moderate - Heavy

Kontra Indikasi

- Alergi terhadap kandungan product

Cara Penggunaan

1. Bersihkan luka sesuai prosedur umum.
2. Keringkan dengan lembut area luka.
3. Pilih ukuran CovaWound Silicone yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi.
4. Buka dan Keluarkan CovaWound Silicone dari kemasannya.
5. Lepas kertas penutup CovaWound Silicone dan letakan sisi bagian putih yang tidak ber perekat pada luka
6. Rekatkan bagian CovaWound Silicone yang mengandung perekat pada kulit (With Border*), Fiksasi CovaWound Silicone menggunakan perban elastis atau menggunakan film dressing (Non Border*).

Spesifikasi

- Kode product 1001515
- Ukuran product 15x15 cm
- Isi 10 pcs/box



Covawound Silicone 1011010

Self Adherent Soft Silicone Foam Dressing With Border

Product Name : Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing w/ Border
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound Silicone 1011010
Kemenkes RI AKL : 11603020849

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing. with Border

Indikasi

Venous ulcers, exudate sedang-berat, luka diabetes, foot ulcers, luka bakar superfisial & parsial, luka trauma, luka post operatif.

Eksudat Level

Moderate - Heavy

Kontra Indikasi

- Alergi terhadap kandungan product

Cara Penggunaan

1. Bersihkan luka sesuai prosedur umum.
2. Keringkan dengan lembut area luka.
3. Pilih ukuran CovaWound Silicone yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi.
4. Buka dan Keluarkan CovaWound Silicone dari kemasannya.
5. Lepas kertas penutup CovaWound Silicone dan letakan sisi bagian putih yang tidak berpelekat pada luka
6. Rekatkan bagian CovaWound Silicone yang mengandung perekat pada kulit (With Border*), Fiksasi CovaWound Silicone menggunakan perban elastis atau menggunakan film dressing (Non Border*).

Spesifikasi

- Kode product 1011010
- Ukuran product 10x10 cm
- Isi 10 pcs/box



Covawound Silicone 1011515

Self Adherent Soft Silicone Foam Dressing With Border

Product Name : Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing w/ Border
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound Silicone 1011515
Kemenkes RI AKL : 11603020849

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing. with Border

Indikasi

Venous ulcers, exudate sedang-berat, luka diabetes, foot ulcers, luka bakar superfisial & parsial, luka trauma, luka post operatif.

Eksudat Level

Moderate - Heavy

Kontra Indikasi

- Alergi terhadap kandungan product

Cara Penggunaan

1. Bersihkan luka sesuai prosedur umum.
2. Keringkan dengan lembut area luka.
3. Pilih ukuran CovaWound Silicone yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi.
4. Buka dan Keluarkan CovaWound Silicone dari kemasannya.
5. Lepas kertas penutup CovaWound Silicone dan letakan sisi bagian putih yang tidak berpelekat pada luka
6. Rekatkan bagian CovaWound Silicone yang mengandung perekat pada kulit (With Border*), Fiksasi CovaWound Silicone menggunakan perban elastis atau menggunakan film dressing (Non Border*).

Spesifikasi

- Kode product 1011515
- Ukuran product 15x15 cm
- Isi 10 pcs/box



Covawound Silicone 1011520

Self Adherent Soft Silicone Foam Dressing With Border

Product Name : Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing w/ Border
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound Silicone 1011520
Kemenkes RI AKL : 11603020849

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Self-Adherent Soft Silicone Foam Dressing. with Border

Indikasi

Venous ulcers, exudate sedang-berat, luka diabetes, foot ulcers, luka bakar superfisial & parsial, luka trauma, luka post operatif.

Eksudat Level

Moderate - Heavy

Kontra Indikasi

- Alergi terhadap kandungan product

Cara Penggunaan

1. Bersihkan luka sesuai prosedur umum.
2. Keringkan dengan lembut area luka.
3. Pilih ukuran CovaWound Silicone yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi.
4. Buka dan Keluarkan CovaWound Silicone dari kemasannya.
5. Lepas kertas penutup CovaWound Silicone dan letakan sisi bagian putih yang tidak berpelekat pada luka
6. Rekatkan bagian CovaWound Silicone yang mengandung perekat pada kulit (With Border*), Fiksasi CovaWound Silicone menggunakan perban elastis atau menggunakan film dressing (Non Border*).

Spesifikasi

- Kode product 1011520
- Ukuran product 15x20 cm
- Isi 10 pcs/box



Covawound Foam 2001013

Non Adherent Foam Dressing

Product Name : Non Adherent Foam Dressing
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound Foam 2001013
Kemenkes RI AKL : 21603020946

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Polyurethane foam berdaya serap tinggi, breathable

Polyurethane Film

Indikasi

Venous ulcers, exudate sedang-berat, luka diabetes, foot ulcers, luka bakar superfisial & parsial, luka trauma, luka post operatif.

Eksudat Level

Moderate - Heavy

Cara Penggunaan

1. Bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
2. Keringkan dengan lembut area luka.
3. Pilih ukuran CovaWound Foam yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi.
4. Buka dan Keluarkan CovaWound Foam dari kemasannya.
5. Lepas kertas penutup CovaWound Foam dan letakan sisi bagian putih yang tidak berpegas pada luka
6. Fiksasi CovaWound Foam menggunakan perban elastis atau menggunakan film dressing (Non Border*).

Spesifikasi

- Kode product 2001013
- Ukuran product 10x13 cm
- Isi 10 pcs/box



Covawound Foam with Border 2010520

Foam Dressing with Adhesive Border

Product Name : Foam Dressing w/ Adhesive Border
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound Foam 2010520
Kemenkes RI AKL : 21603021171

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Polyurethane foam berdaya serap tinggi, breathable
Polyurethane Film

Indikasi

Venous leg ulcers, pressures ulcers, leg ulcers, diabetic ulcers,
foot ulcers, luka bakar, luka trauma, luka post operatif.

Eksudat Level

Moderate - Heavy

Cara Penggunaan

1. Bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
2. Keringkan dengan lembut area luka.
3. Pilih ukuran CovaWound Foam yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi.
4. Buka dan Keluarkan CovaWound Foam dari kemasannya.
5. Lepas kertas penutup CovaWound Foam dan letakan sisi bagian putih yang tidak ber perekat pada luka
6. Rekatkan bagian CovaWound Foam yang mengandung perekat pada kulit (With Border*), Fiksasi CovaWound Foam menggunakan perban elastis atau menggunakan film dressing dengan border.

Spesifikasi

- Kode product 2010520
- Ukuran product 10x25 cm
- Isi 10 pcs/box



Covawound Alginate 3000230

Alginate Dressing

Product Name : Alginate Dressing
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound Alginate 3000230
Kemenkes RI AKL : 21603020974

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Alginate Dressing yang mengandung garam calcium dari alginic acid yang kaya dgn mannuronic acid.

Indikasi

Exudate sedang-berat, luka bakar parsial, arterial diabetic, venous stasis ulcers, luka ber cavitas, luka post operasi, luka trauma.

Eksudat Level

Moderate - Heavy

Cara Penggunaan

1. Debridement dan bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
2. Gunting dan sesuaikan CovaWound Alginate dengan diameter luka.
3. Ikatkan CovaWound Alginate pada luka, untuk luka berongga dan dalam dapat menggunakan CovaWound Alginate Rope.
4. Tutup CovaWound Alginate dengan secondary dressing.

Spesifikasi

- Kode product 3000230
- Ukuran product 2x30 cm
- Isi 5 pcs/box



Covawound Alginate 3000505

Alginate Dressing

Product Name : Alginate Dressing
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound Alginate 3000505
Kemenkes RI AKL : 21603020974

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Alginate Dressing yang mengandung garam calcium dari alginic acid yang kaya dgn mannuronic acid.

Indikasi

Exudate sedang-berat, luka bakar parsial, arterial diabetic, venous stasis ulcers, luka ber cavitas, luka post operasi, luka trauma.

Eksudat Level


Moderate - Heavy

Cara Penggunaan

1. Debridement dan bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
2. Gunting dan sesuaikan CovaWound Alginate dengan diameter luka.
3. lekatkan CovaWound Alginate pada luka, untuk luka berongga dan dalam dapat menggunakan CovaWound Alginate Rope.
4. Tutup CovaWound Alginate dengan secondary dressing.

Spesifikasi

- Kode product 3000505
- Ukuran product 5x5 cm
- Isi 5 pcs/box

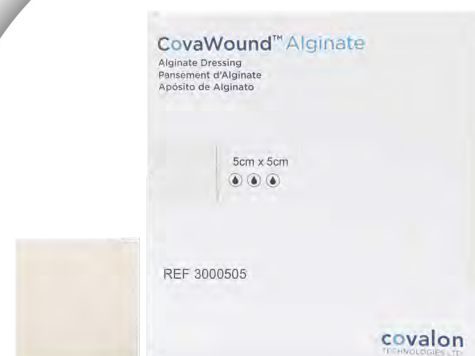

Covawound Alginate 3001010

Alginate Dressing

Product Name : Alginate Dressing
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound Alginate 3001010
Kemenkes RI AKL : 21603020974

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Alginate Dressing yang mengandung garam calcium dari alginic acid yang kaya dgn mannuronic acid.

Indikasi

Exudate sedang-berat, luka bakar parsial, arterial diabetic, venous stasis ulcers, luka ber cavitas, luka post operasi, luka trauma.

Eksudat Level


Moderate - Heavy

Cara Penggunaan

1. Debridement dan bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
2. Gunting dan sesuaikan CovaWound Alginate dengan diameter luka.
3. Ikatkan CovaWound Alginate pada luka, untuk luka berongga dan dalam dapat menggunakan CovaWound Alginate Rope.
4. Tutup CovaWound Alginate dengan secondary dressing.

Spesifikasi

- Kode product 3001010
- Ukuran product 10x10 cm
- Isi 5 pcs/box

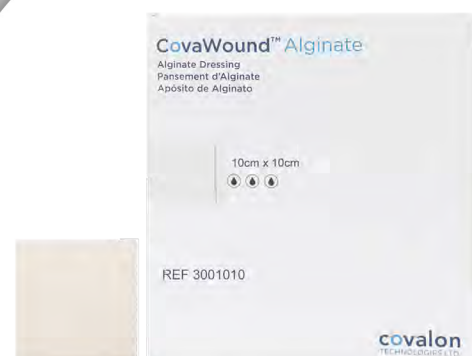

Covawound Alginate Ag 3100505

Alginate Dressing with Silver

Product Name : Alginate Dressing w/ Silver
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound Alginate Ag 3100505
Kemenkes RI AKL : 21603021139

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Alginate Dressing yang mengandung garam calcium dari alginic acid yang kaya dengan mannuronic acid & Silver.

Indikasi

Luka superficial – dalam, pressure sores, arterial ulcers, venous leg ulcers, diabetic ulcers, luka post operative, Ion Ag sbg antibacteria.

Eksudat Level

Moderate - Heavy

Cara Penggunaan

1. Debridement dan bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
2. Gunting dan sesuaikan CovaWound Alginate Ag dengan diameter luka.
3. Ikatkan CovaWound Alginate Ag pada luka, untuk luka berongga dan dalam dapat menggunakan CovaWound Alginate Ag Rope.
4. Tutup CovaWound Alginate Ag dengan secondary dressing.

Spesifikasi

- Kode product 3100505
- Ukuran product 5x5 cm
- Isi 10 pcs/box



Covawound SuperAbsorbent 4001010

SuperAbsorbent Dressing with Border

Product Name : SuperAbsorbent Dressing w/ Border
Merk : Covalon
Types of Products : CovaWound SuperAbsorbent 4001010
Kemenkes RI AKL : 21603021140

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

PE = Polyethylene, PU = Polyurethane foam,

SAP = SuperAbsorbent Polymer.

Indikasi

Absorpsi cairan, cegah maserasi, wound dengan exudates berat, leg ulcers, foot ulcers, pressure ulcers, luka trauma, luka bedah, luka bakar derajat 1 dan 2.

Eksudat Level

Moderate - Heavy

Cara Penggunaan

1. Bersihkan luka sesuai prosedur standard protokol.
2. Keringkan dengan lembut area luka.
3. Pilih ukuran CovaWound SuperAbsorbent yang sesuai, tambahkan 2cm dari tepi luka untuk fiksasi
4. Buka kemasan, lepas kertas penutup CovaWound SuperAbsorbent dengan sisi bagian dalam warna putih pada luka.
5. Rekatkan bagian CovaWound SuperAbsorbent yang mengandung perekat pada kulit sehat di sekitar luka (CovaWound SuperAbsorbent memiliki border pada tepi dressingnya).

Spesifikasi

- Kode product 4001010
- Ukuran product 10x10 cm
- Isi 10 pcs/box



Colactive Plus Ag TWBC1034

Collagen Matrix Dressing with Silver

Product Name : Collagen Matrix Dressing w/ Silver
Merk : Covalon
Types of Products : Colactive Plus Ag TWBC1034
Kemenkes RI AKL : 21603023455

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Collagen, sodium alginate, carboxymethylcellulose (CMC), ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) & Silver.

Indikasi

Ulkus tekan, ulkus diabetes, ulkus vaskular, ulkus vena, donor skin & skin graft, luka traumatik, luka bedah, luka bakar grade 1 dan 2.

Eksudat Level

Light - Heavy

Kontra Indikasi

Luka bakar grade 3

Alergi terhadap kandungan product

Cara Penggunaan

1. Debridement dan irigasi luka dengan cairan pembersih luka sebelum aplikasi product ColActive PLUS Ag.
2. Potong ColActive PLUS Ag sesuai dengan ukuran luka.
Untuk luka yang banyak eksudat, gunakan ColActive PLUS Ag langsung pada luka. Untuk luka kering dengan sedikit eksudat, basahi luka dengan air suling untuk memulai proses pembentukan gel.
3. Tutupi ColActive PLUS Ag dengan dressing sekunder.
4. Ganti ColActive PLUS Ag jika diperlukan atau sesuai dengan kondisi luka.

Spesifikasi

- Kode product TWBC1034
- Ukuran product 10x10 cm
- Isi 10 pcs/box



Kode : TWBC1033, TWBC1034, TWBC1032

IV Clear TWBD1012

Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Dressing

Product Name : Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Dressing
Merk : Covalon
Types of Products : IV Clear TWBD1012
Kemenkes RI AKL : 21603021204

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Securement Dressing with Chlorhexidine and Silver.

Indikasi

Dressing Infus Intravena, mencegah CRBSI (Catheter Related Blood Stream Infections).

Cara Penggunaan

1. Pegang bagian atas dressing dan lepaskan seal penutup berwarna biru.
2. Tempatkan perekat yang terbuka di kulit, mulai dari bagian tengah, tekan secara lembut di atas kulit untuk memastikan perekatan yang baik.
3. Lepaskan seal penutup biru yang tersisa, rekat bagian tepi yg tersisa tekan lembut untuk mendapat perekatan yang baik.
4. Lepaskan bingkai kertas dengan hati-hati, rekatkan bagian tepi agar merekat dengan baik di kulit.
5. Setelah IV Clear® terpasang dengan baik, pasang pengaman strip di bagian atas dan bagian bawah IV Clear®. Pastikan pengaman strip bagian bawah ditempatkan di bawah garis yang ada.
6. Tempatkan informasi label sesuai dengan protocol rumah sakit.



Spesifikasi

- Kode product TWBD1012
- Ukuran product 10x12 cm
- Isi 25 pcs/box



IV Clear TWBD1016

Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Dressing

Product Name : Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Dressing
Merk : Covalon
Types of Products : IV Clear TWBD1016
Kemenkes RI AKL : 21603021204

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Securement Dressing with Chlorhexidine and Silver.

Indikasi

Dressing Infus Intravena, mencegah CRBSI (Catheter Related Blood Stream Infections).

Cara Penggunaan

1. Pegang bagian atas dressing dan lepaskan seal penutup berwarna biru.
2. Tempatkan perekat yang terbuka di kulit, mulai dari bagian tengah, tekan secara lembut di atas kulit untuk memastikan perekatan yang baik.
3. Lepaskan seal penutup biru yang tersisa, rekat bagian tepi yg tersisa tekan lembut untuk mendapat perekatan yang baik.
4. Lepaskan bingkai kertas dengan hati-hati, rekatkan bagian tepi agar merekat dengan baik di kulit.
5. Setelah IV Clear® terpasang dengan baik, pasang pengaman strip di bagian atas dan bagian bawah IV Clear®. Pastikan pengaman strip bagian bawah ditempatkan di bawah garis yang ada.
6. Tempatkan informasi label sesuai dengan protocol rumah sakit.



Spesifikasi

- Kode product TWBD1016
- Ukuran product 6x7 cm
- Isi 25 pcs/box



IV Clear TWBD1020

Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Dressing

Product Name : Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Dressing
Merk : Covalon
Types of Products : IV Clear TWBD1020
Kemenkes RI AKL : 21603021204

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Keunggulan

Komposisi

Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Securement Dressing with Chlorhexidine and Silver.

Indikasi

Dressing Infus Intravena, mencegah CRBSI (Catheter Related Blood Stream Infections).

Cara Penggunaan

1. Pegang bagian atas dressing dan lepaskan seal penutup berwarna biru.
2. Tempatkan perekat yang terbuka di kulit, mulai dari bagian tengah, tekan secara lembut di atas kulit untuk memastikan perekatan yang baik.
3. Lepaskan seal penutup biru yang tersisa, rekat bagian tepi yg tersisa tekan lembut untuk mendapat perekatan yang baik.
4. Lepaskan bingkai kertas dengan hati-hati, rekatkan bagian tepi agar merekat dengan baik di kulit.
5. Setelah IV Clear® terpasang dengan baik, pasang pengaman strip di bagian atas dan bagian bawah IV Clear®. Pastikan pengaman strip bagian bawah ditempatkan di bawah garis yang ada.
6. Tempatkan informasi label sesuai dengan protocol rumah sakit.



Spesifikasi

- Kode product TWBD1020
- Ukuran product 6x7 cm
- Isi 25 pcs/box

